



medi

Führung · Kühlung · Kompression

Effektive Therapie mit Stabimed RICE und medi Rehab one

medi. ich fühl mich besser.

Führung · Kühlung · Kompression

Das neue medi Therapiekonzept zur posttraumatischen und postoperativen Therapie

1. Stabimed® RICE



Die neue Softorthese **Stabimed RICE** vereint physiologische Führung, Kühlung und Kompression in einer Orthese. Ihr modularer Aufbau ermöglicht einen flexiblen Einsatz bei vielen Verletzungen und chirurgischen Eingriffen.



2. medi Rehab one



Medizinische
Kompression


Der neue **medi Rehab one** wurde speziell zur Behandlung von postoperativen und posttraumatischen Ödemen im Bereich Orthopädie entwickelt. Er vereint bewährte medizinische Kompression (CCL 1) mit einer neuen Stricktechnologie für eine besonders leichte und sichere Handhabung.

Stabimed® RICE



Kompression

- Ein-Kammer-Luftsystem mit Luftpumpe und integriertem Ventilknopf
- Individuelle Druckdosierung
- Einfache Handhabung

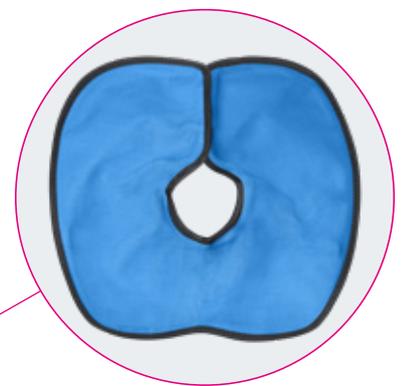

Kühlung

- Zwei wiederverwendbare Gel-Kühlkompressen zum Wechsel während der Kühlanwendung
- Mit Klett einfach in der Orthese zu befestigen
- Anatomisch vorgeformt und passt sich dem Knie flexibel an

Physiologische Führung

Zwei flache Aluminium-Gelenkschienen zur Führung des Knies mit der Möglichkeit zur Bewegungslimitierung

(Ext. 10°, 20°, 30°, 45°
und Flex. 45°, 60°, 75°, 90°)

Weitere Produkt-Vorteile

- Zwei breite Verschlussgurte mit Klett zur einfachen Handhabung
- Zwei beiliegende Gurtverlängerungen für Oberschenkelumfänge bis 90 cm
- Universalvariante: eine Größe, links und rechts einsetzbar

Führung · Kühlung · Kompression

Flexibler Einsatz in der Therapie

Die Stabimed RICE ist eine Softorthese zur physiologischen Führung des Kniegelenks mit optionaler Kühlfunktion und Kompression. Bei Bedarf können Flexion und Extension mit den Gelenken limitiert werden.

Die integrierte Luftkammer lässt sich dank beiliegender Pumpe einfach und individuell befüllen. Zusammen mit

der Gel-Kühlkomresse können so Schwellungen und Schmerzen wirksam gelindert werden.

Das effektive Zusammenspiel aus Führung, Kühlung und Kompression zeichnet die neue Stabimed RICE besonders aus. Zusätzlich überzeugt die Orthese durch leichte Handhabung und hohen Tragekomfort.

Alle Informationen zur Stabimed® RICE

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung der physiologischen Führung des Kniegelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates notwendig ist, wie z. B.:

- nach Seitenbandverletzungen
- nach Meniskusverletzungen
- nach endoprothetischen Eingriffen
- bei Knieinstabilitäten
- bei Kniegelenkarthrose

Hilfsmittelnummer

23.04.03.1051


Warum gerade Stabimed RICE?

Softorthese zur Knie-Führung mit optionaler Kühl- und Kompressionsfunktion

Zweckbestimmung: Die Stabimed RICE ist eine Knieführungsorthese mit Extensions- / Flexionsbegrenzung.

Rezeptbeispiel

Kontaktkasse bzw. Kostenträger	APL 7	Hilfs- / Mittelnr.	23.04.03.1051	Rezept-Nr.		Arztbes.-Nr.	
Name, Vorname des Versicherten		Diagnose	Endoprothetischer Eingriff	Vertraggeber			
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status		Vertraggeber-Nr.	IK gültig bis	Datum	
Rp. (Bitte Leerdäume durchstreichen)							
23.04.03.1051				Softorthese zur Knie-Führung mit optionaler Kühl- und Kompressionsfunktion			
Diagnose: Endoprothetischer Eingriff							
1 Stück Stabimed RICE							
Unterschrift des Arztes Muster 18 (4.2002)							
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!							
Unfalltag				Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer			

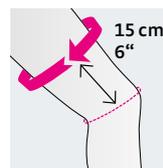

Größe universal

Art.-Nr. G.170.000

Maximaler Umfang

60 cm ohne Gurtverlängerung –
90 cm mit Gurtverlängerung

Anziehvideo



Per QR-Code oder Short-URL
medi.biz/stabimed-rice
direkt zum anschaulichen
Anleitungsvideo für
Patienten!


medi Rehab one



Bewährtes Mikronoppen-Haftband sensitiv für zusätzlichen Halt und angenehmen Tragekomfort auf der Haut.




Dünn und besonders atmungsaktiv am Oberschenkel und im sensiblen Beugebereich für mehr Tragekomfort.

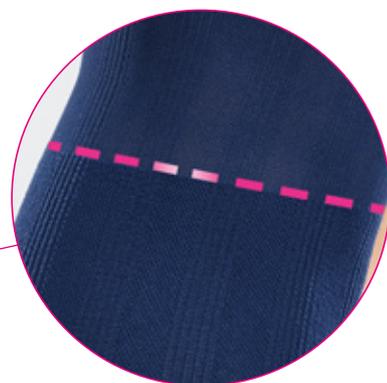

Positionierungshilfe für leichte und sichere Handhabung im Alltag.



Vorgeformte Ferse für eine leichte Positionierung und einen verbesserten Sitz.

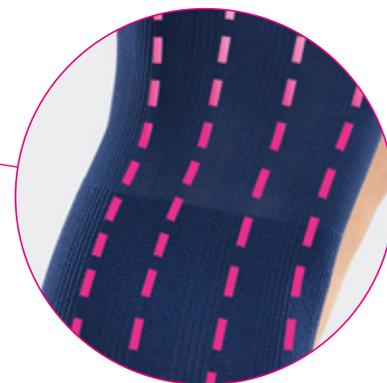

3D-Längsrippen erleichtern das korrekte Anlegen und geben Sicherheit bei der Handhabung.

Neuentwicklung von medi

Speziell für die posttraumatische und postoperative Ödemtherapie

medi Rehab one ist der erste medizinische Kompressionsstrumpf, den medi speziell zur Behandlung von posttraumatischen und postoperativen Ödemen im Bereich Orthopädie entwickelt hat.

Leichtes Anziehen

Die neue Stricktechnologie mit Mikro-Plüsch sorgt dafür, dass der medizinische Kompressionsstrumpf beim Anziehen besonders leicht über die Haut gleitet und sicher am Bein sitzt. Damit ermöglicht die neue Technologie insbesondere schmerzempfindlichen Patienten eine einfache Handhabung. Gleichzeitig unterstützt die Mikro-Plüsch-Technologie den rutschsicheren Sitz am Bein. Zusätzliches Merino-Plüsch im Mittel- und Vorfuß sorgt für mehr Tragekomfort und Thermoregulierung.



Der medi Rehab one ist ein medizinischer Kompressionsstrumpf der CCL 1. Er hat einen definierten graduierenden Druckverlauf von distal nach proximal. Durch Druck von außen auf das Gewebe werden bestehende Ödeme reduziert und einer Ödem-bildung entgegengewirkt. Zusätzlich: Angenehme Kompression bereits im Mittelfußbereich.

Effektive Ödemtherapie mit medi Rehab one

Haupt-Indikationen


- Ödeme
- Posttraumatische Ödeme
- Postoperative Ödeme

Hilfsmittelnummer

Schenkelstrumpf (AG): 17.06.03.0103

Warum gerade medi Rehab one?

- Schenkelstrumpf (AG): Positionierungshilfe am Knie für leichte und korrekte Handhabung

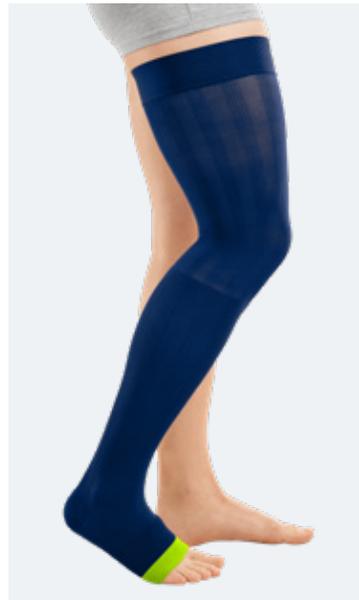

Anziehvideo



Per QR-Code oder Short-URL **medi.biz/rehab-one** direkt zum anschaulichen Anziehvideo für Patienten!

Rezeptbeispiel

Krankenkasse bzw. Kostenträger:

Name, Vorname des Versicherten:

Kassen-Nr.: Versicherungs-Nr.: Status:

Vertragsart-Nr.: VK gültig bis: Datum:


Rp. (Bitte Leerläufe durchstreichen)
 17.06.03.0103
 Diagnose: postoperatives Ödem
 2 Stück medizinische Kompressionsstrümpfe medi Rehab one CCL1, Schenkelstrumpf AG, mit Hafttrand, offene Fußspitze

Positionierungshilfe am Knie für leichte und korrekte Handhabung

Unterschrift des Arztes: Muster 16 (A.2002)

Bei Arbeitsunfall auszufüllen!
 Unfalltag: Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer:

So nehmen Sie richtig Maß

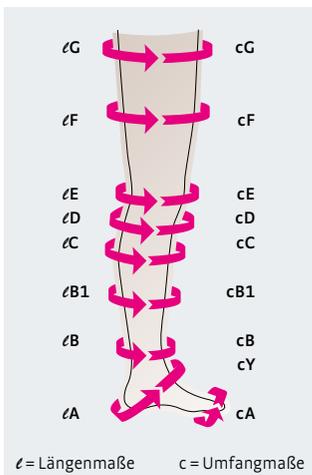


	Umfangmaße in cm					
	II	III	IV	V	VI	
HB normal	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	
HB weit	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	
cG	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	
cF	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	
cE	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	
cD	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	
cC	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	
cB1	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	
cB	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	

Längenmaß in cm	Art.-Nr.	Version
Schenkelstrumpf (AG)		
72-83	RA61402-6*	normal NoB
	RA65402-6*	normal NoB-W
62-71	RA51402-6*	kurz NoB
	RA55402-6*	kurz NoB-W

* Wählen Sie die Größe an der letzten Stelle der Artikelnummer von 2 bis 6.

Zweckbestimmung: medi Rehab one ist ein rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur kompressiven Versorgung der unteren Extremitäten, hauptsächlich zur Vorbeugung und Behandlung von postoperativen und posttraumatischen Ödemen und allgemeinen Schwellungszuständen.

Führung · Kühlung · Kompression mit der Stabimed® RICE

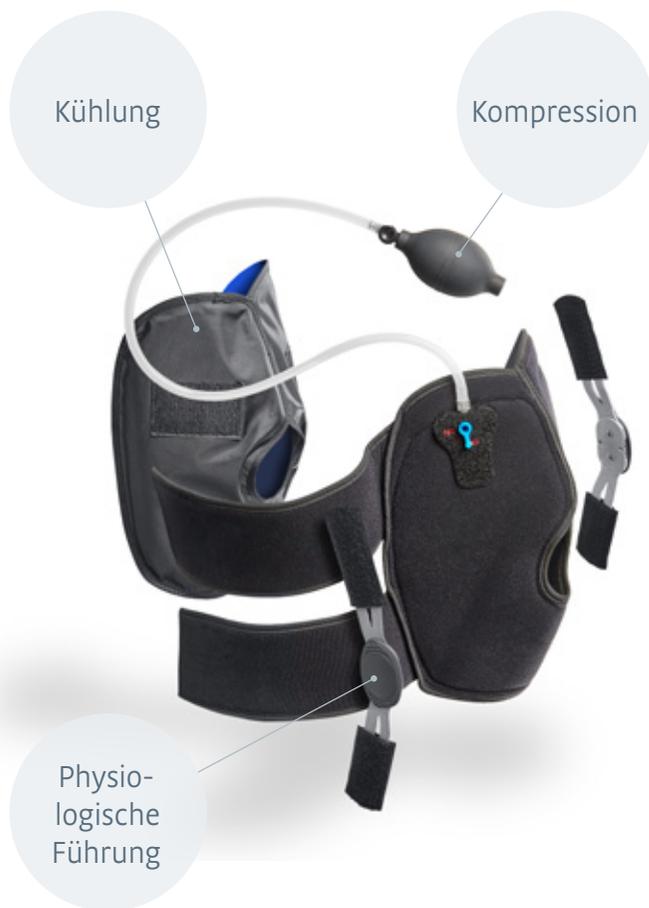

Hilfsmittelnummer

23.04.03.1051

Warum gerade Stabimed RICE?

Softorthese zur Knie-Führung mit optionaler Kühl- und Kompressionsfunktion

Rezeptbeispiel

Krankenkasse bzw. Kostenträger	HIV- Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Gr. 9 Gr. 10	Regi- str.- Nr.	Arztstempelnummer / IK
Name, Vorname des Versicherten	Zusatz- Leistungen		
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status	
Vertrags-Nr.	VK gültig bis	Datum	
Rp., (Bitte Leerblöcke durchstreichen)			
23.04.03.1051			
Diagnose: Endoprothetischer Eingriff			
1 Stück Stabimed RICE			
Unterschrift des Arztes Muster 16 (4.2002)			
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!			
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer		

Stabilisierung und Kühlung

Zur Unterstützung der konservativen und postoperativen Therapie

Bei allen M.4s comfort, M.4s PCL dynamic und M.4 X-lock Knieorthesen liegt eine hochwertige Kühlkomresse für Ihre Patienten bei.

Die Kühlkomresse ist leicht anformbar und wird in Kombination mit den medi Knieorthesen eingesetzt. Die wiederverwendbare Komresse kann zur Linderung von Schmerzen, Entzündungen und Schwellungen genutzt werden.

Zweckbestimmung: M.4s comfort / M.4s PCL dynamic / M.4 X-lock sind Rahmenorthesen zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions- / Flexionsbegrenzung.



M.4s® comfort
HMV.-Nr. 23.04.03.3013



M.4s® PCL dynamic
HMV.-Nr. beantragt für
23.04.xx.xxxx



M.4 X-lock®
HMV.-Nr. 23.04.03.3013



Kühlkomresse

Anatomisch vorgeformte Kühlkomresse in **jeder** Produktverpackung

Headquarters
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
T +49 921 912-333
F +49 921 912-57
medi@medi.de
www.medi.de



0030123 / 09.2020