

## Effektive Ödemtherapie mit medi Rehab® one

### Haupt-Indikationen


- Ödeme
- Posttraumatische Ödeme
- Postoperative Ödeme

### Hilfsmittelnummer

Schenkelstrumpf (AG): 17.06.03.0103

### Warum gerade medi Rehab one?

- Schenkelstrumpf (AG): Positionierungshilfe am Knie für leichte und korrekte Handhabung

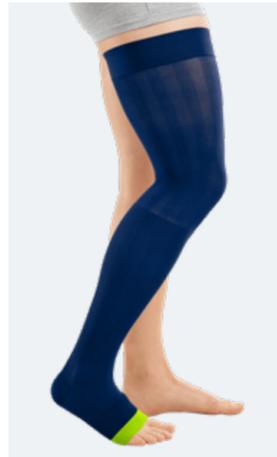

### Anziehvideo



Per QR-Code oder Short-URL [medi.biz/rehab-one](https://medi.biz/rehab-one) direkt zum anschaulichen Anziehvideo für Patienten!

**Rezeptbeispiel**

Rezept (Bitte Lesart durchstreichen)

17.06.03.0103  
Diagnose: postoperatives Ödem


2 Stück medizinische Kompressionsstrümpfe medi Rehab one CCL 1, Schenkelstrumpf AG, mit Haftrand, offene Fußspitze

Positionierungshilfe am Knie für leichte und korrekte Handhabung

Bei Arbeitsmittel auszufüllen:  
Lieferung: \_\_\_\_\_ Lieferbetrieb oder Arbeitsgebernummer: \_\_\_\_\_

Unterstützt das Arztes  
Muster 16 (4.2002)

### So nehmen Sie richtig Maß

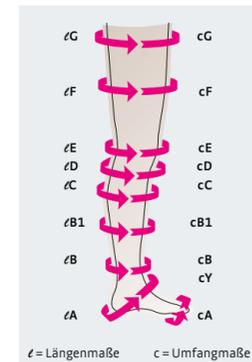

Umfangmaße in cm	II	III	IV	V	VI
HB normal	45–52	49–56	53–60	56–64	60–68
HB weit	53–62	57–67	61–72	65–77	69–81
cG	45–62	49–67	53–72	56–77	60–81
cF	41–56	44–60	47–65	50–69	53–73
cE	33–40	35–43	37–45	39–48	41–51
cD	29–36	32–39	34–42	36–45	38–48
cC	30–37	33–40	35–43	37–46	39–49
cB1	24–29	26–32	29–35	31–37	33–39
cB	20–22	22–24	24–26	26–28	28–30
cY	28–33	29–35	31–37	32–38	33–40
cA	19–24	21–26	23–29	25–32	27–34

Längenmaß in cm	Art.-Nr.	Version
72–83	RA61402–6*	normal NoB
	RA65402–6*	normal NoB-W
62–71	RA51402–6*	kurz NoB
	RA55402–6*	kurz NoB-W

\* Wählen Sie die Größe an der letzten Stelle der Artikelnummer von 2 bis 6.

**Zweckbestimmung:** medi Rehab one ist ein rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur kompressiven Versorgung der unteren Extremitäten, hauptsächlich zur Vorbeugung und Behandlung von postoperativen und posttraumatischen Ödemen und allgemeinen Schwellungszuständen.

Headquarters  
medi GmbH & Co. KG  
Medicusstraße 1  
95448 Bayreuth  
Germany  
T +49 921 912-333  
F +49 921 912-57  
medi@medi.de  
www.medi.de



0030123 / 07.2021



## Führung · Kühlung · Kompression

Effektive Therapie mit Stabimed® RICE / Stabimed® pro RICE und medi Rehab® one

medi. ich fühl mich besser.

# Führung · Kühlung · Kompression

Das neue medi Therapiekonzept zur posttraumatischen und postoperativen Therapie

## 1. Stabimed® RICE



Die Softorthese **Stabimed RICE** vereint physiologische Führung, Kühlung und Kompression in einer Orthese. Ihr modularer Aufbau ermöglicht einen flexiblen Einsatz bei vielen Verletzungen und chirurgischen Eingriffen.



## 2. medi Rehab® one



Der neue **medi Rehab one** wurde speziell zur Behandlung von postoperativen und posttraumatischen Ödemen im Bereich Orthopädie entwickelt. Er vereint bewährte medizinische Kompression (CCL 1) mit einer neuen Stricktechnologie für eine besonders leichte und sichere Handhabung.




# Stabimed® RICE



## Kompression

- Ein-Kammer-Luftsystem mit Luftpumpe und integriertem Ventilknopf
- Individuelle Druckdosierung
- Einfache Handhabung

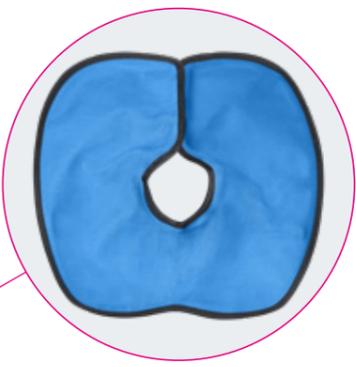

## Kühlung

- Zwei wiederverwendbare Gel-Kühlkompressen zum Wechsel während der Kühlanwendung
- Mit Klett einfach in der Orthese zu befestigen
- Anatomisch vorgeformt und passt sich dem Knie flexibel an



## Physiologische Führung

Zwei flache Aluminium-Gelenkschienen zur Führung des Knies mit der Möglichkeit zur Bewegungslimitierung

(Ext. 10°, 20°, 30°, 45° und Flex. 45°, 60°, 75°, 90°)

## Weitere Produkt-Vorteile

- Zwei breite Verschlussgurte mit Klett zur einfachen Handhabung
- Zwei beiliegende Gurtverlängerungen für Oberschenkelumfänge bis 90 cm
- Universalvariante: eine Größe, links und rechts einsetzbar

## Führung · Kühlung · Kompression

### Flexibler Einsatz in der Therapie

Die Stabimed RICE ist eine Softorthese zur physiologischen Führung des Kniegelenks mit optionaler Kühlfunktion und Kompression. Bei Bedarf können Flexion und Extension mit den Gelenken limitiert werden.

Die integrierte Luftkammer lässt sich dank beiliegender Pumpe einfach und individuell befüllen. Zusammen mit

der Gel-Kühlkomresse können so Schwellungen und Schmerzen wirksam gelindert werden.

Das effektive Zusammenspiel aus Führung, Kühlung und Kompression zeichnet die neue Stabimed RICE besonders aus. Zusätzlich überzeugt die Orthese durch leichte Handhabung und hohen Tragekomfort.

## Alle Informationen zur Stabimed® RICE / Stabimed® pro RICE

### Indikationen Stabimed RICE

Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung der physiologischen Führung des Kniegelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates notwendig ist, wie z. B.:

- nach Seitenbandverletzungen
- nach Meniskusverletzungen
- nach endoprothetischen Eingriffen
- bei Knieinstabilitäten
- bei Kniegelenkarthrose

### Indikationen Stabimed pro RICE

Alle Indikationen, bei denen eine Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks notwendig ist, wie z. B.:

- Bei Knieinstabilitäten
- Nach Meniskusverletzungen
- Nach endoprothetischen Eingriffen
- Bei Kniegelenkarthrose

### Hilfsmittelnummer

Stabimed RICE: 23.04.03.1051  
Stabimed pro RICE: 23.04.03.0067

### Warum gerade Stabimed RICE / Stabimed pro RICE?

Softorthese zur Knie-Führung mit optionaler Kühl- und Kompressionsfunktion


### Zweckbestimmung

Stabimed RICE: Knieführungsorthese mit Extensions- / Flexionsbegrenzung.  
Stabimed pro RICE: Knieführungsorthese ohne Extensions- / Flexionsbegrenzung.

**Rezeptbeispiel**

23.04.03.1051  
Diagnose: Endoprothetischer Eingriff  
1 Stück Stabimed RICE

Softorthese zur Knie-Führung mit optionaler Kühl- und Kompressionsfunktion

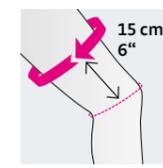

<b>Größe</b>	universal
<b>Art.-Nr.</b>	
<b>Stabimed RICE</b>	G.170.000
<b>Stabimed pro RICE</b>	G.180.000

**Maximaler Umfang**  
60 cm ohne Gurtverlängerung –  
90 cm mit Gurtverlängerung

### Anziehvideo

Per QR-Code oder Short-URL [medi.biz/stabimed-rice](https://medi.biz/stabimed-rice) direkt zum anschaulichen Anleitungsvideo für Patienten!


# medi Rehab® one



Bewährtes Mikronoppen-Haftband sensitiv für zusätzlichen Halt und angenehmen Tragekomfort auf der Haut.



Dünn und besonders atmungsaktiv am Oberschenkel und im sensiblen Beugebereich für mehr Tragekomfort.

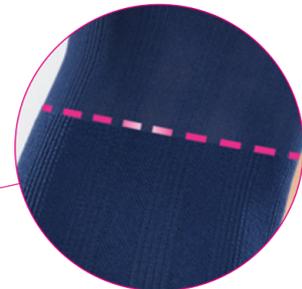

Positionierungshilfe für leichte und sichere Handhabung im Alltag.



Vorgeformte Ferse für eine leichte Positionierung und einen verbesserten Sitz.



3D-Längsrippen erleichtern das korrekte Anlegen und geben Sicherheit bei der Handhabung.

## Neuentwicklung von medi

### Speziell für die posttraumatische und postoperative Ödemtherapie

medi Rehab one ist der erste medizinische Kompressionsstrumpf, den medi speziell zur Behandlung von posttraumatischen und postoperativen Ödemen im Bereich Orthopädie entwickelt hat.


### Leichtes Anziehen

Die neue Stricktechnologie mit Mikro-Plüsch sorgt dafür, dass der medizinische Kompressionsstrumpf beim Anziehen besonders leicht über die Haut gleitet und sicher am Bein sitzt. Damit ermöglicht die neue Technologie insbesondere schmerzempfindlichen Patienten eine einfache Handhabung. Gleichzeitig unterstützt die Mikro-Plüsch-Technologie den rutschsicheren Sitz am Bein. Zusätzliches Merino-Plüsch im Mittel- und Vorfuß sorgt für mehr Tragekomfort und Thermoregulierung.



Der medi Rehab one ist ein medizinischer Kompressionsstrumpf der CCL 1. Er hat einen definierten graduierenden Druckverlauf von distal nach proximal. Durch Druck von außen auf das Gewebe werden bestehende Ödeme reduziert und einer Ödem-bildung entgegengewirkt. Zusätzlich: Angenehme Kompression bereits im Mittelfußbereich.

## Führung · Kühlung · Kompression mit der Stabimed® RICE

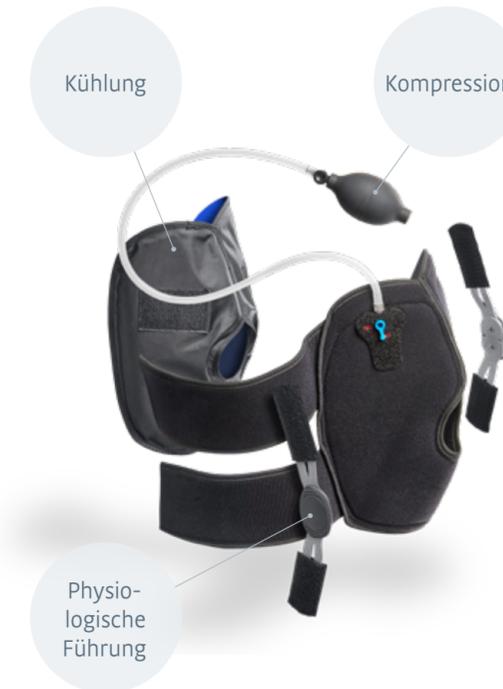

Hilfsmittelnummer  
23.04.03.1051

Warum gerade Stabimed RICE?  
Softorthese zur Knie-Führung mit optionaler Kühl- und Kompressionsfunktion



## Stabilisierung und Kühlung

### Zur Unterstützung der konservativen und postoperativen Therapie

Bei allen M.4s comfort, M.4s PCL dynamic und M.4 X-lock Knieorthesen liegt eine hochwertige Kühlkomresse für Ihre Patienten bei.

Die Kühlkomresse ist leicht anformbar und wird in Kombination mit den medi Knieorthesen eingesetzt. Die wiederverwendbare Komresse kann zur Linderung von Schmerzen, Entzündungen und Schwellungen genutzt werden.



M.4s® comfort  
HMV.-Nr. 23.04.03.3013

M.4's PCL dynamic  
HMV.-Nr. beantragt für 23.04.xx.xxxx

M.4 X-lock®  
HMV.-Nr. 23.04.03.3013



Kühlkomresse

Anatomisch vorgeformte Kühlkomresse in jeder Produktverpackung.

Zweckbestimmung: M.4s comfort / M.4s PCL dynamic / M.4 X-lock sind Rahmenorthesen zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions- / Flexionsbegrenzung.